

Wrocław, 06.04.2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 przesyłamy zalecenia w zakresie dezynfekcji zestawu Pregnabit przez placówki medyczne. Zalecamy wykonanie dezynfekcji każdorazowo przy przyjęciu urządzenia od pacjentki i przekazaniu kolejnej.

Dezynfekcja zestawu Pregnabit:

1. Przed przystąpieniem do czynności dezynfekcyjnych należy przygotować:
 - 1.1. Jednorazowe rękawiczki;
 - 1.2. Płyn do dezynfekcji z rozpylaczem o zawartości alkoholu etylowego około 70,0 % (V/V).
2. Opis czynności dezynfekcyjnych:
 - 2.1. Zestaw Pregnabit będący przedmiotem dezynfekcji należy umieścić w miejscu dedykowanym do wykonania czynności dezynfekcyjnych.
 - 2.2. Przebieg czynności należy dokumentować na formularzu „Raport dezynfekcji zestawu Pregnabit” dołączonym do niniejszego pisma.
 - 2.3. Płyn do dezynfekcji należy równomiernie rozpylić na futerał z każdej jego strony z odległości ok. 30 cm, a następnie odczekać 1 minutę.
 - 2.4. Otworzyć futerał, wyjąć wszystkie elementy zestawu i umieścić je obok futerału.
 - 2.5. Z odległości ok. 30 cm należy równomiernie rozpylić płyn do dezynfekcji wewnątrz futerału oraz dokładnie rozpylić na wszystkie powierzchnie elementów zestawu Pregnabit, w tym m.in. na urządzenie, sondy, pulsoksymetr, materiały graficzne, butelkę z żelem do KTG, załączone chusteczki, pasy, rzepy oraz przedłużki, a następnie odczekać 1 min.
 - 2.6. Po zakończonym procesie dezynfekcji należy:
 - 2.6.1. Umieścić wszystkie elementy zestawu Pregnabit w dedykowanych miejscach futerału.
 - 2.6.2. Zdjąć środki ochrony osobistej i wyrzucić do kosza na śmieci.

Z wyrazami szacunku,



Jacek Gnich
Prezes Zarządu Nestmedic S.A.



Anna Szopa
Quality and Regulatory Affairs Manager

www.nestmedic.com